



e-MEDIA
43 rue Dietherlin
67100 Strasbourg

Support Technique
Téléphone : 06 73 34 31 79
Email : techno@e-media.fr

e-MEDIA • PENARANDA • MEDIGIT

MEDIA WEB

MODE D'EMPLOI

Gravure
Diffusion
Impression
Consoles PACS
Gestion RIS ou SIR

Avant propos

Ce document décrit la procédure d'utilisation de **MEDIA web**.

Cette utilisation ne requiert pas de compétence particulière en informatique, toutefois, pour toute question veuillez contacter notre **support technique** :

Téléphone : 06 73 34 31 79

Mail : techno@e-media.fr

Support technique e-Media

Téléphone : +33 (0)6 73 34 31 79

Mail : techno@e-media.fr

Fax : +33 (0)3 88 32 39 56

1. ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

Activation de compte MediaWeb

MediaWeb

Envoyé : Mer. 01/06/2011

A : Monsieur le Médecin

Activation du compte de
Monsieur le Médecin

Pour activer votre compte cliquez sur le lien ci-dessous :

[ACTIVATION DU COMPTE](#)

Cordialement, Monsieur le Radiologue.

Activation de compte

Merci de saisir l'identifiant qui vous a été fourni:

Activation de compte

Veillez définir votre mot de passe:

Mot de passe:

Confirmation

Activation de compte

Félicitation, votre compte est validé.

Le médecin radiologue qui vous autorisera à consulter vos examens vous demandera votre adresse e-mail et en échange vous donnera un code d'accès.

Dans un premier temps, vous recevrez un e-mail qui vous demandera d'activer votre compte (cf. visuel ci-contre).



Pour activer votre compte, cliquez sur le lien « **Activation du compte** ».



Veillez ensuite saisir le **code d'accès** qui vous a été communiqué par le centre de radiologie.



Une fois le code d'accès renseigné, définissez librement votre **mot de passe**.



Enfin, une dernière page **récapitule** votre code d'accès et votre mot de passe.

2. CONNEXION


Vous pouvez vous connecter à Media web depuis votre navigateur grâce à votre compte fourni par l'administrateur du site à l'adresse suivante :
<http://10.0.1.250>




The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Compte', 'Examen', and 'Administration'. The 'Compte' tab is selected. Below the tabs, there are two input fields: 'Identifiant' and 'Mot de passe'. A 'Connexion' button is located below the input fields.

3. LISTE DES EXAMENS

Une fois connecté, vous pouvez visualiser la liste des examens auxquels vous avez accès. Cette liste peut être filtrée à l'aide des champs de saisie en partie haute et ordonnée avec un simple clic sur l'entête de colonne souhaitée. A tout moment, vous pouvez revenir à la liste complète en utilisant « Réinitialiser les filtres ».

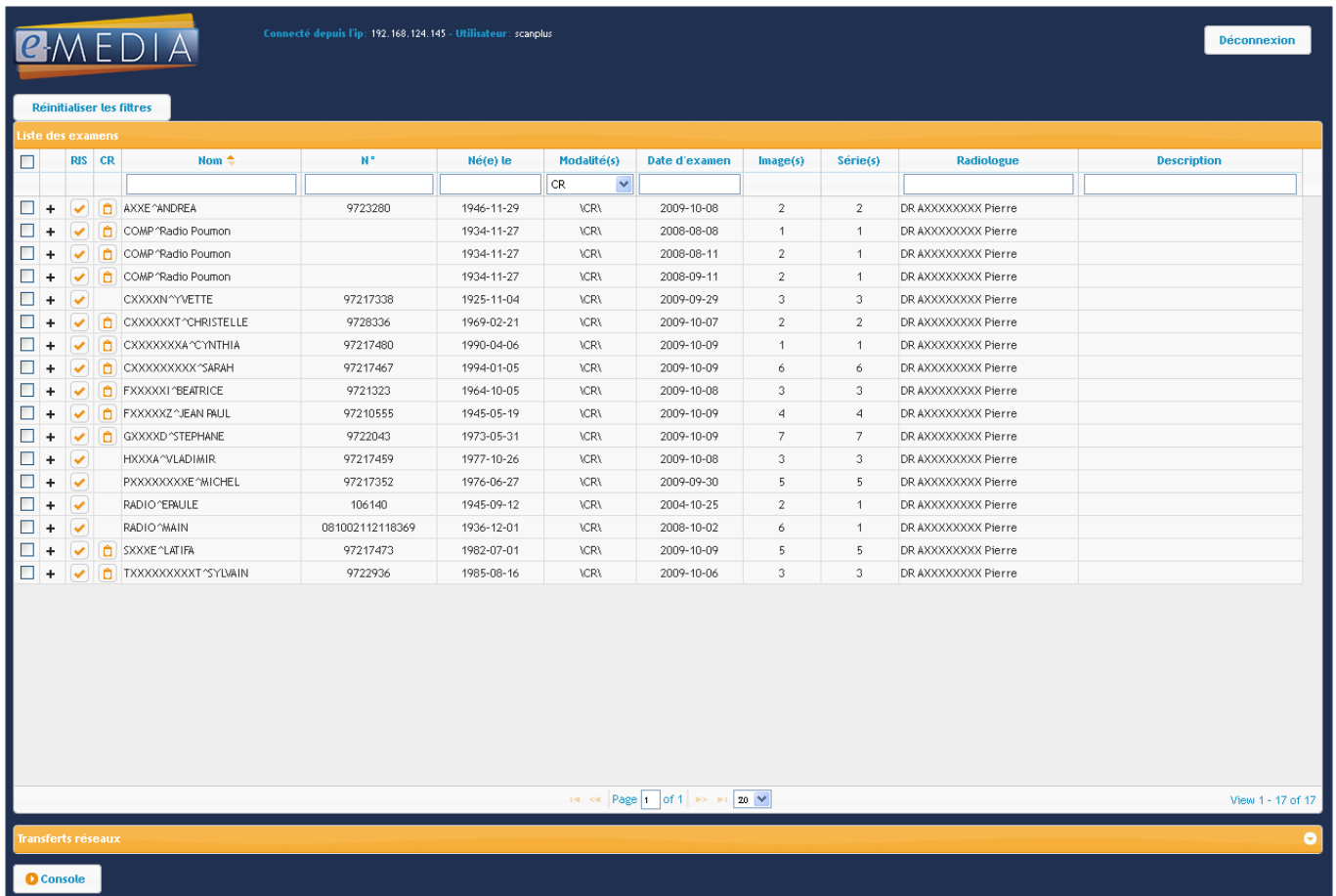



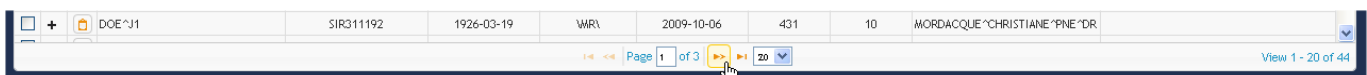



↓ La liste complète des examens est disponible en plusieurs pages. Vous pouvez naviguer grâce aux boutons « page suivante » et « page précédente ». Le nombre d'examens affichés dans une même page est modifiable en sélectionnant l'une des valeurs possibles dans la liste juste à coté.









↓ Cliquez sur l'examen qui vous intéresse pour afficher davantage d'informations.


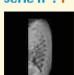
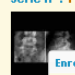
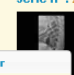

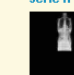
<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	CXXXXXXXXX^CYNTHIA	97217480	1990-04-06	\CR\	2009-10-09	1	1	DR AXXXXXXXXX Pierre
<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	CXXXXXXXXX^SARAH	97217467	1994-01-05	\CR\	2009-10-09	6	6	DR AXXXXXXXXX Pierre
<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	FXXXXXX^BEATRICE	9721323	1964-10-05	\CR\	2009-10-08	3	3	DR AXXXXXXXXX Pierre

<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	CXXXXXXXXX^SARAH	97217467	1994-01-05	\CR\	2009-10-09	6	6	DR AXXXXXXXXX Pierre
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Compte rendu voir l'examen </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 2 Série n°: 2 Série n°: 4 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;">       </div>										

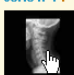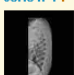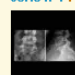↓ En survolant les séries qui constituent votre examen, vous pourrez afficher les différentes informations de l'élément.
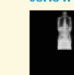
<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	CXXXXXXXXX^SARAH	97217467	1994-01-05	\CR\	2009-10-09	6	6	DR AXXXXXXXXX Pierre																																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Compte rendu voir l'examen </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 2 Série n°: 2 Série n°: 4 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;">       </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>+</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>FXXX</td> <td>Modalité:</td> <td>CR</td> <td>9721323</td> <td>1964-10-05</td> <td>\CR\</td> <td>2009-10-08</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DR AXXXXXXXXX Pierre</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>+</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>FXXX</td> <td>Description:</td> <td>Face/Profil (L)</td> <td>97210555</td> <td>1945-05-19</td> <td>\CR\</td> <td>2009-10-09</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>DR AXXXXXXXXX Pierre</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>+</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>GXX</td> <td>Protocole:</td> <td>Cervical</td> <td>9722043</td> <td>1973-05-31</td> <td>\CR\</td> <td>2009-10-09</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>DR AXXXXXXXXX Pierre</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>+</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>HXX</td> <td>Nombre d'images:</td> <td>1</td> <td>97217459</td> <td>1977-10-26</td> <td>\CR\</td> <td>2009-10-08</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DR AXXXXXXXXX Pierre</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>+</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>PXXXXXXX^MICHEL</td> <td></td> <td></td> <td>97217352</td> <td>1976-06-27</td> <td>\CR\</td> <td>2009-09-30</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>DR AXXXXXXXXX Pierre</td> </tr> </table>											<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXX	Modalité:	CR	9721323	1964-10-05	\CR\	2009-10-08	3	3	DR AXXXXXXXXX Pierre	<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXX	Description:	Face/Profil (L)	97210555	1945-05-19	\CR\	2009-10-09	4	4	DR AXXXXXXXXX Pierre	<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	GXX	Protocole:	Cervical	9722043	1973-05-31	\CR\	2009-10-09	7	7	DR AXXXXXXXXX Pierre	<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	HXX	Nombre d'images:	1	97217459	1977-10-26	\CR\	2009-10-08	3	3	DR AXXXXXXXXX Pierre	<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	PXXXXXXX^MICHEL			97217352	1976-06-27	\CR\	2009-09-30	5	5	DR AXXXXXXXXX Pierre
<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXX	Modalité:	CR	9721323	1964-10-05	\CR\	2009-10-08	3	3	DR AXXXXXXXXX Pierre																																																															
<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXX	Description:	Face/Profil (L)	97210555	1945-05-19	\CR\	2009-10-09	4	4	DR AXXXXXXXXX Pierre																																																															
<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	GXX	Protocole:	Cervical	9722043	1973-05-31	\CR\	2009-10-09	7	7	DR AXXXXXXXXX Pierre																																																															
<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	HXX	Nombre d'images:	1	97217459	1977-10-26	\CR\	2009-10-08	3	3	DR AXXXXXXXXX Pierre																																																															
<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	PXXXXXXX^MICHEL			97217352	1976-06-27	\CR\	2009-09-30	5	5	DR AXXXXXXXXX Pierre																																																															

↓ Un clic avec le bouton droit de la souris permet d'afficher un menu à partir duquel vous pourrez enregistrer la série sur votre ordinateur.

<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	CXXXXXXXXX^SARAH	97217467	1994-01-05	\CR\	2009-10-09	6	6	DR AXXXXXXXXX Pierre																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Compte rendu voir l'examen </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 2 Série n°: 2 Série n°: 4 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;">       </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>+</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>FXXXXXX^BEATRICE</td> <td></td> <td></td> <td>9721323</td> <td>1964-10-05</td> <td>\CR\</td> <td>2009-10-08</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DR AXXXXXXXXX Pierre</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>+</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>FXXXXXZ^JEAN PAUL</td> <td></td> <td></td> <td>97210555</td> <td>1945-05-19</td> <td>\CR\</td> <td>2009-10-09</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>DR AXXXXXXXXX Pierre</td> </tr> </table>											<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXXXXX^BEATRICE			9721323	1964-10-05	\CR\	2009-10-08	3	3	DR AXXXXXXXXX Pierre	<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXXXXZ^JEAN PAUL			97210555	1945-05-19	\CR\	2009-10-09	4	4	DR AXXXXXXXXX Pierre
<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXXXXX^BEATRICE			9721323	1964-10-05	\CR\	2009-10-08	3	3	DR AXXXXXXXXX Pierre																								
<input type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	FXXXXXZ^JEAN PAUL			97210555	1945-05-19	\CR\	2009-10-09	4	4	DR AXXXXXXXXX Pierre																								

↓ « **Compte rendu** » vous permet d'afficher le compte rendu de l'examen.

<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	CXXXXXXXXX^SARAH	97217467	1994-01-05	\CR\	2009-10-09	6	6	DR AXXXXXXXXX Pierre
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Compte rendu voir l'examen </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 1 Série n°: 2 Série n°: 2 Série n°: 4 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;">       </div>										

- ↓ Le compte rendu apparaît alors. En sélectionnant « **voir l'examen** », vous pourrez visualiser l'intégralité de l'examen. Le bouton « **Ok** » ferme la boîte de dialogue et vous renvoie à la liste.

Compte rendu [X]


sl
Technique numérisée
Nice le 09 Octobre 2009
Mademoiselle Sarah CXXXXXXXXX
RADIOGRAPHIES DU RACHIS DANS SON ENSEMBLE DE FACE
Il existe une bascule modérée du bassin sur la gauche de 5 mm.
L'examen montre un trouble de la statique dorso-lombaire avec scoliose à double courbure.
Faible courbure dorsale dextro-convexe dont l'angle ne dépasse pas 6,5° ; au niveau lombaire, dextro-convexe avec un angle = à 12,5°.
Faible rotation des corps vertébraux ne dépassant 1 X.
Riser = à 3.
Il n'existe pas d'anomalie significative des sacro-iliaques.
On observe un pincement lombaire surtout inférieur.
Les clichés de profil ne montrent aucune anomalie, trouble de la statique du rachis cervical.
Alignement correct du mur postérieur.
Pas de rectitude significative.
Au niveau dorsal, tendance à une légère hyper cyphose ; cette atteinte est cependant modérée.
Aspect correct des corps vertébraux.
Pas d'irrégularité des plateaux.
Au niveau lombaire, tendance à une hyper lordose avec aspect cependant correct des corps vertébraux.
L'examen montre surtout un pincement postérieur des deux derniers disques.
Les clichés centrés visualisent un pincement droit modéré L4-L5 et gauche L5-S1.
Docteur _____

[Voir l'examen] [Ok]

↓ En sélectionnant « voir l'examen », vous pourrez visualiser l'intégralité de l'examen.



- ↓ Les informations de l'examen sélectionné sont affichées en haut de l'écran. Le bouton « **Retour aux examens** » vous permet à tous moment de revenir sur la liste de l'écran précédent. Vous pouvez à nouveau accéder au compte rendu de l'examen grâce au bouton « **Compte-rendu** ». Ce dernier s'ouvrira de la même façon que sur l'écran précédent.

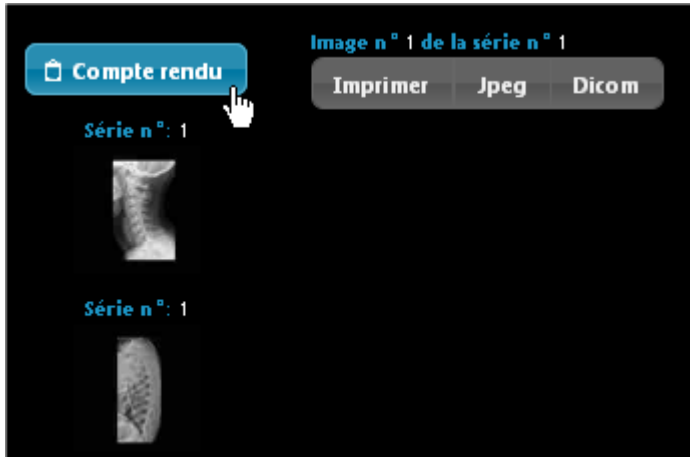



↓ Les informations sur les séries sont toujours accessibles au survol de la souris.



- ↓ Un simple clic sur une série affichera celle-ci au centre de l'écran. La barre de navigation sur la droite se remplira au fur-et-à-mesure du téléchargement des images. Vous pouvez commencer à naviguer en utilisant la molette de la souris directement sur l'image au centre, ou en utilisant la poignée sur la barre de navigation.




4. Enregistrer l'image sur votre ordinateur

- ↓ Un petit menu propre à l'image courante vous permettra de :
- l'imprimer,
 - la télécharger au format JPEG ou Dicom

Le format Dicom vous permet d'ouvrir cette image avec n'importe quel logiciel compatible Dicom.



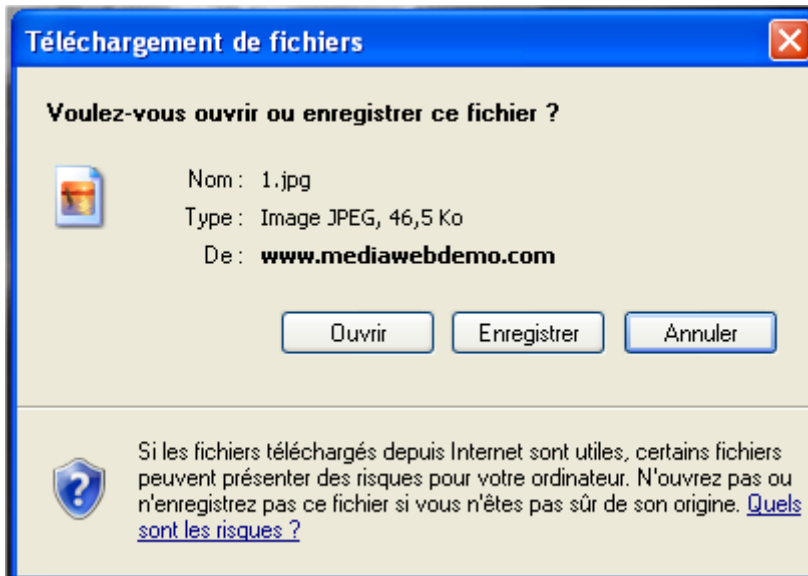

👍 Si vous disposez de la solution Media view sur votre poste, vous pouvez consulter la documentation correspondante pour utiliser des outils de mesures, de fenêtrages et bien d'autres directement depuis votre ordinateur.